

# オストミー・ベルトガード

## OSTOMY BELT GUARD


### FOR SAFETY DRIVE



### ストーマとストーマパウチを外部の圧迫・衝撃から保護します

自動車に装備されているシートベルト・プリテンショナーは、衝突時にシートベルトを瞬間的に10～15cm引き込み、乗員が前方に投げ出されないように体をシートに固定する装置です。クリップやストッパーなどでシートベルトをたるませた状態で着用することは、事故の際、プリテンショナーが正常に作動せず、本人だけではなく同乗者にまで重大な危険を及ぼす可能性があります。

シートベルトは正しく着用しましょう！

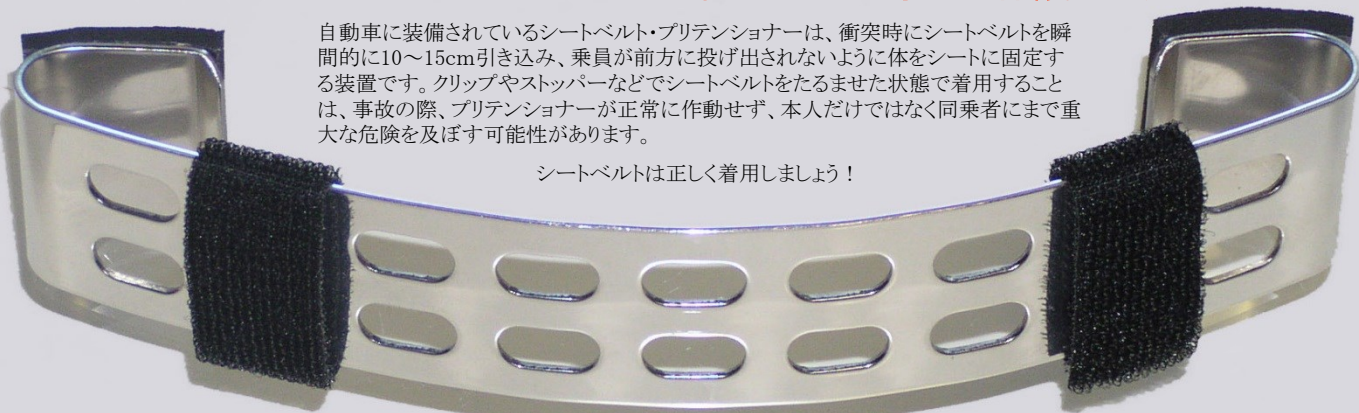


### 製品の特長


- ◆ 自動車や飛行機のシートベルトを正しく安全に着用することができます
- ◆ 満員電車や人込みでの圧迫からストーマとストーマパウチを保護します
- ◆ ストーマを気にすることなく、自由にファンションを楽しめます
- ◆ ベルト付ユニフォームや作業着を着用しなければならない職業でも利便性を発揮します

### 使用方法 1

シートベルトに装着

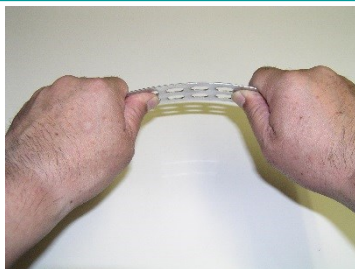

ベルトガードをストーマの高さに合わせて調節します

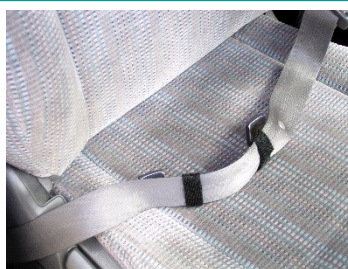

付属のマジックテープでシートベルトに装着します  
※シートベルトは体に密着させて着用してください



### 使用方法 2

ズボン・スカートに装着



ベルト部分の内側に付属のマジックテープを貼り付け、ベルトガードを装着します



ベルトの圧迫からストーマを保護します

心臓ペースメーカーをシートベルトの圧迫から保護する用途にも使用することができます



使用法1と同様にペースメーカーを跨ぐ様に高さを調節し、付属のマジックテープでシートベルトに装着します。

品名	オストミー・ベルトガード
サイズ	35mm x 約200mm
重量	約90グラム
素材	ステンレススティール (SUS304)
附属品	マジックテープ製ベルト通し 2pcs
価格	4,750円 (消費税別) 日本製 PAT.P

※製品改良のため、仕様は予告なく変更する場合があります。

製造・発売 : 有限会社イーストタウン

〒604-8424 京都市中京区西ノ京樋ノ口町10

TEL 075-354-6181 FAX 075-354-6182